




CREATE IT.

www.nsk-inc.com

PR-D986P Ver.1 15.07.05

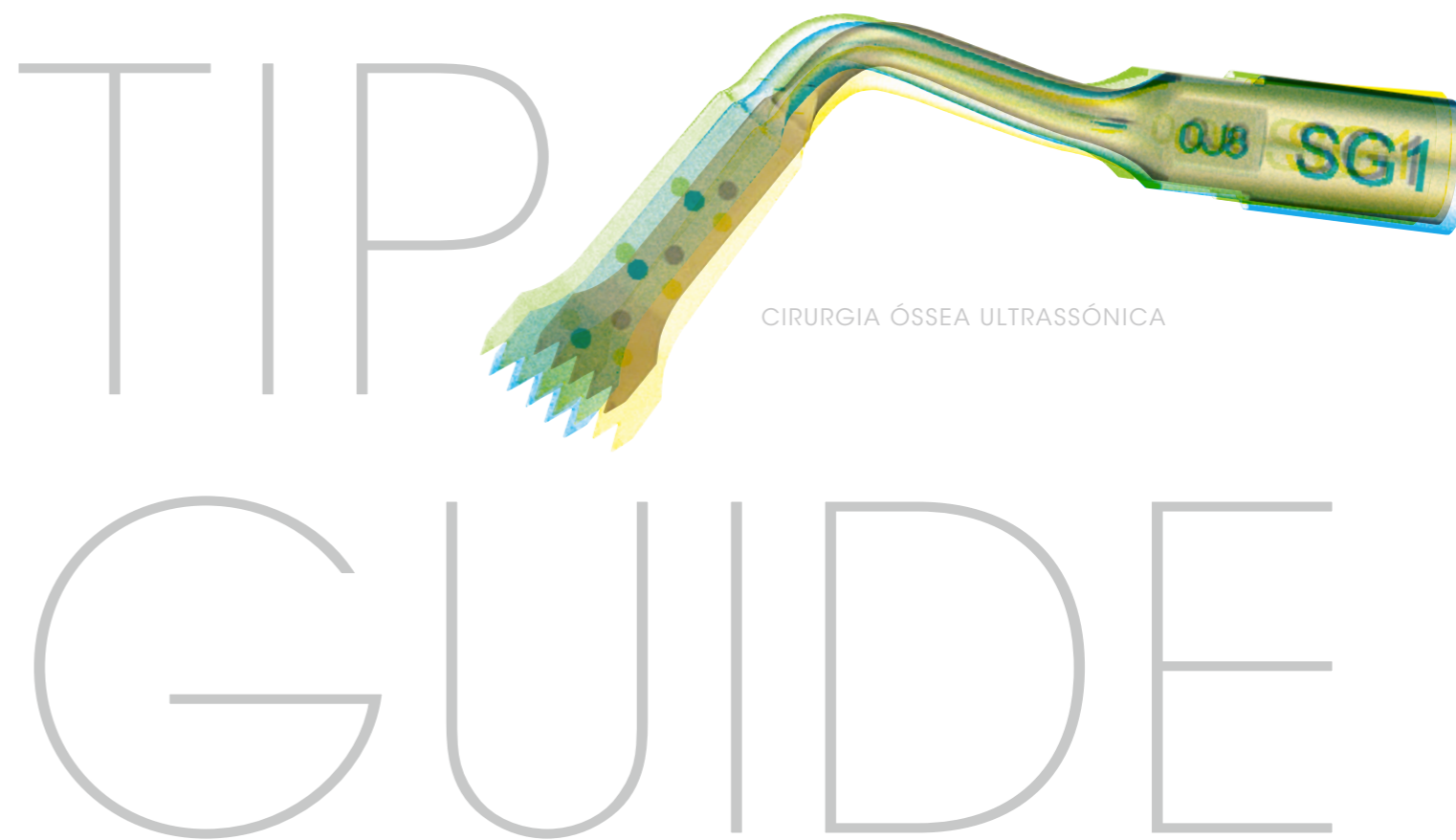

CIRURGIA ÓSSEA ULTRASSÓNICA

SURG

CIRURGIA ÓSSEA	P05-P12
RASPAGEM	P13-P14
EXTRAÇÃO	P15-P16
ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)	P17-P20
PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE	P21-P24
ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)	P25-P26*
ELEVAÇÃO DE SEIO	P27
SEPARAÇÃO DA MEMBRANA DO SEIO	P28

PERIO

RASPAGEM	P29-P31
PERIO	P32
PERIO-CONTROL	P33-P34

ENDO

ENDODONTIA	P35-P36
KIT DE PONTA	P37-P40

*Fotografias disponibilizadas por Yasuhiro Kizu, D.D.S., Ph.D.
OMFC (CLÍNICA DE CUIDADO ORAL E MAXILOFACIAL DE YOKOHAMA)

LINHA PONTA VARIOSURG

PONTAS ULTRASSÔNICAS

A NSK oferece uma gama com mais de 50 pontas otimizadas para os três modos da série VarioSurg.

- SURG** Modo SURG para cirurgia óssea
- PERIO** Modo PERIO para manutenção
- ENDO** Modo ENDO para tratamento do canal radicular



As pontas são concebidas para preservar o tecido, manter a velocidade de corte e cortar facilmente o osso. Os dentes serrilhados numa lâmina irregular otimizam o corte ósseo. Isto também reduz a obstrução, o que mantém a velocidade de corte.

CIRURGIA ÓSSEA	RASPAGEM	EXTRAÇÃO	ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)
PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE	ELEVAÇÃO DE SEIO	SEPARAÇÃO DA MEMBRANA DO SEIO	RASPAGEM
PERIO	PERIO - CONTROL	ENDODONTIA	KIT DE PONTA
Limpeza no Desinfetador Térmico	Autoclavagem até 135°C	ELEVADA POTÊNCIA As pontas de elevada potência podem ser utilizadas até 150 % da configuração de potência.	

VarioSurg3

POTENCIAL EVOLUÍDO

Personalização da Procura de Perfeição


Os sistemas de cirurgia óssea ultrassônica são essenciais no tratamento implantológico e cirúrgico moderno. A peça de mão potente VarioSurg3 tem um corpo elegante e leve que assegura uma fadiga da mão mínima e uma visibilidade extraordinária. A diversidade de pontas torna os procedimentos mais fáceis e descontraídos, contribuindo para um tratamento mais preciso e eficiente.





CIRURGIA ÓSSEA

MODELO **SG1** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

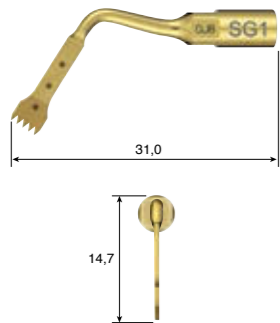


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305101

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm e 9 mm da extremidade
- Cinco dentes; 0,6 mm de espessura

MODELO **H-SG1** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 150%

ELEVADA POTÊNCIA

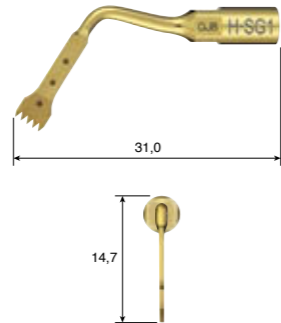


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305151

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm e 9 mm da extremidade
- Cinco dentes; 0,6 mm de espessura

MODELO **SG1A** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

Para regiões mais profundas que requerem pontas mais longas.

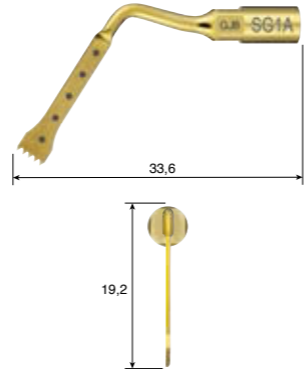


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305138

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm e 15 mm
- Cinco dentes; 0,6 mm de espessura

MODELO **SG8** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

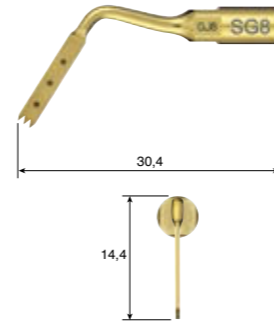


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305109

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm e 9 mm da extremidade
- Três dentes; 0,6 mm de espessura

MODELO **H-SG8** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 150%

ELEVADA POTÊNCIA

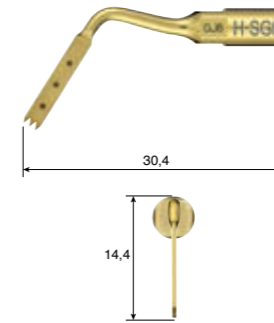


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305155

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm e 9 mm da extremidade
- Três dentes; 0,6 mm de espessura

MODELO **SG8A** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

Para regiões mais profundas que requerem pontas mais longas.

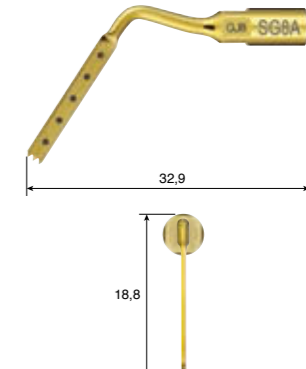

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305139



- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm e 15 mm
- Três dentes; 0,6 mm de espessura



Amostragem mandibular anterior unilateral
SG1, H-SG1, SG1A

MODELO **SG14R** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

MODELO **SG14L** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

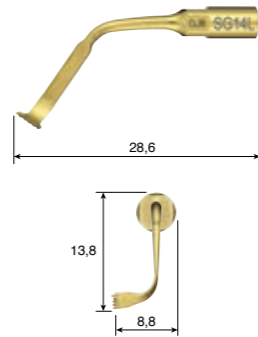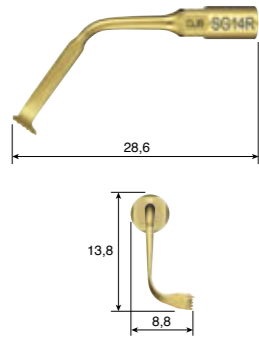

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305122

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305123

- Revestimento TiN • Ponta curva direita 90°*
- Cinco dentes; 0,6 mm de espessura

- Revestimento TiN • Ponta curva esquerda 90°*
- Cinco dentes; 0,6 mm de espessura



Colheita mandibular anterior
SG14R, SG14L



* A direção da curva da ponta é definida pela respetiva vista anterior.

MODELO **H-SG8R** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 150%

MODELO **H-SG8L** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 150%

ELEVADA POTÊNCIA

ELEVADA POTÊNCIA

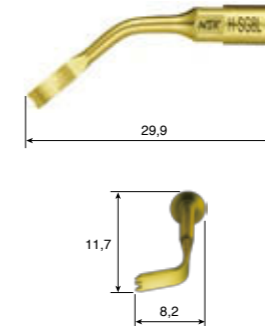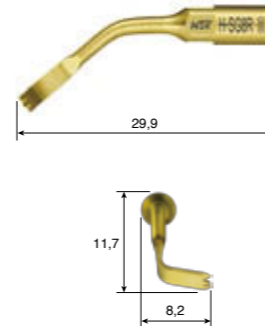

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305156

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305157





- Revestimento TiN • Ponta curva direita 90°*
- Três dentes; 0,6 mm de espessura

- Revestimento TiN • Ponta curva esquerda 90°*
- Três dentes; 0,6 mm de espessura

* A direção da curva da ponta é definida pela respetiva vista anterior.

MODELO **SG2R** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

MODELO **SG2L** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

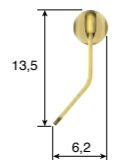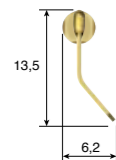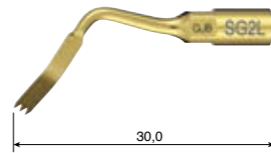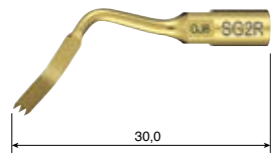

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305102

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305103

- Revestimento TiN • Ponta curva direita*
- Três dentes; 0,6 mm de espessura

- Revestimento TiN • Ponta curva esquerda*
- Três dentes; 0,6 mm de espessura



Excisão de tórus ósseo
SG2R, SG2L

* A direção da curva da ponta é definida pela respetiva vista anterior.

MODELO **SG19** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%




MODELO **SG30** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

MODELO **SG58** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

Para cortar superfícies curvas.

Em cortes finos para reduzir a perda óssea. Também adequado para corticotomias.

Para remover tórus na mandíbula posterior e superfície lingual mandibular.

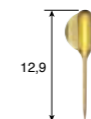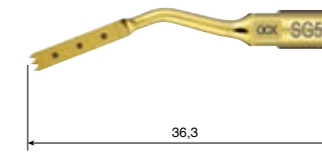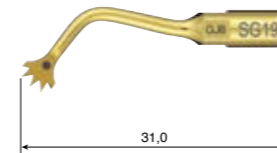

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305135

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305137

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305141

- Revestimento TiN • Pontos a 3 mm da extremidade da ponta
- Cinco dentes; 0,8 mm de espessura

- Revestimento TiN • Gume afiado • 0,5 mm de espessura

- Revestimento TiN
- Pontos a 3 mm, 6 mm e 9 mm da extremidade da ponta
- Três dentes; 0,6 mm de espessura



Colheita mandibular na fase de abordagem
SG19



Incisão crestal alveolar para colher osso (em cortes finos de osso)
SG30



A parte de corte e um tórus ósseo
SG58

RASPAGEM



Para alisar a crista alveolar ou colher fragmentos ósseos. **RASPAGEM**

MODELO **SG3**


NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%



CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305104

- Revestimento TiN • Ponta de espátula trilátera
- Raspador de gume único

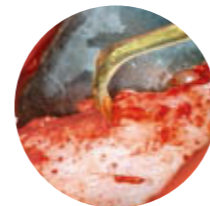

Alisamento da crista alveolar
SG3

MODELO **SG4**


NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%



CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305105

- Revestimento TiN • Ponta de espátula
- Raspador de gume duplo

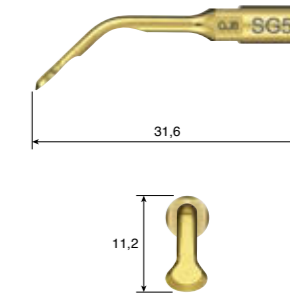

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305106

- Revestimento TiN • Ponta de espátula redonda
- Raspador de gume único



Osteoplastias
SG5



EXTRAÇÃO

Rasga o ligamento periodontal para simplificar a remoção de suturas. Também eficaz na extração de dentes anquilosados.

EXTRAÇÃO

MODELO **SG17**



NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

MODELO **SG18R**

NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

MODELO **SG18L**

NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

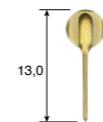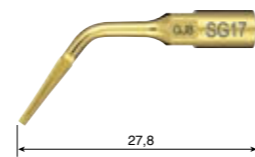

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305132


• Revestimento TiN • 0,7 mm de espessura



CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305133

• Revestimento TiN • Ponta em ângulo direito*
• 0,7 mm de espessura

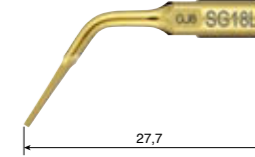

CÓDIGO DE ENCOMENDA


Z305134

• Revestimento TiN • Ponta em ângulo esquerdo*
• 0,7 mm de espessura



Extração
SG17, SG18R, SG18L


*A direção do ângulo da ponta é definida pela respetiva vista anterior.

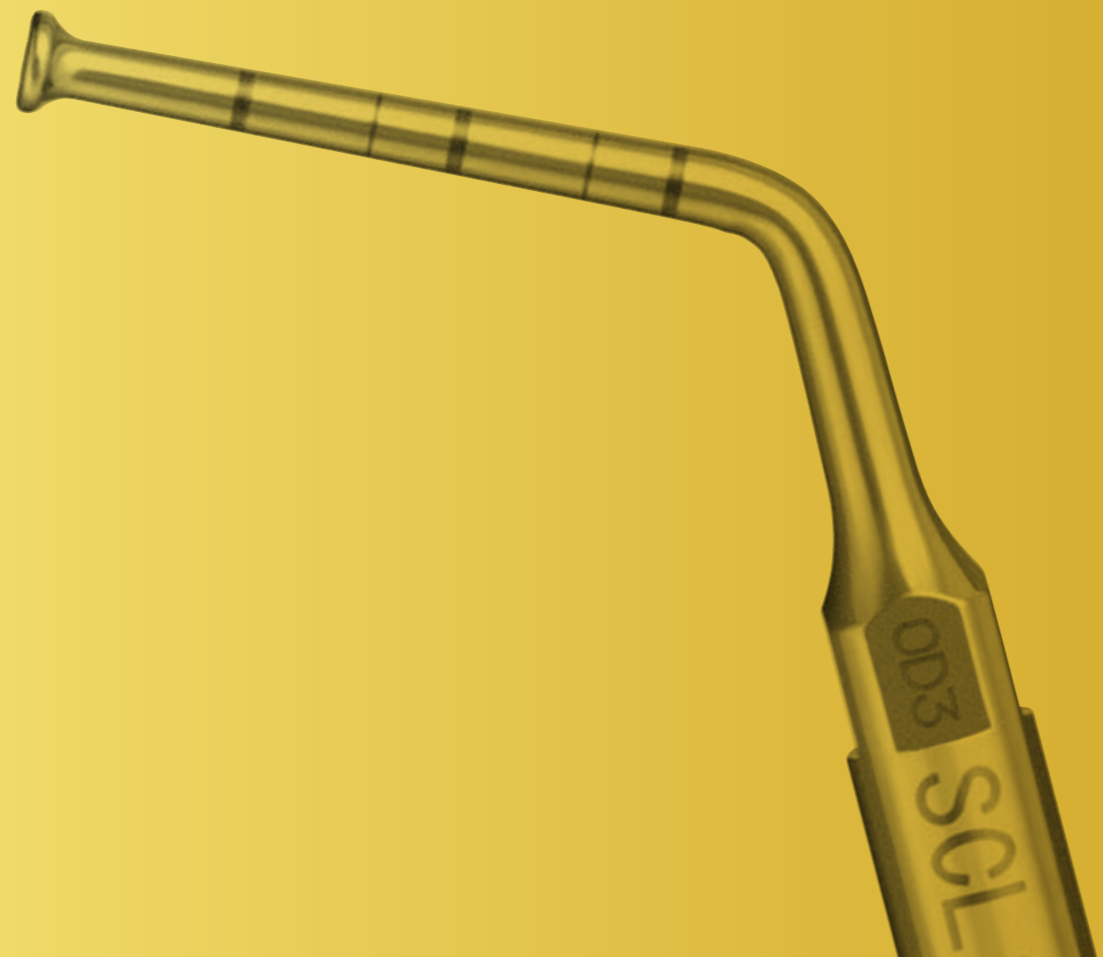

ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO
(ABORDAGEM CRESTAL)

A ponta para elevação de alvéolo aumenta a segurança dos procedimentos, sendo menos invasiva e permitindo elevações do seio para tempos de cadeia reduzidos. A osteotomia com vibração ultrassônica reduz o risco de danos na membrana Schneiderian.


A eliminação da percussão através da técnica de osteótomo reduz o desconforto do doente e potenciais tonturas.

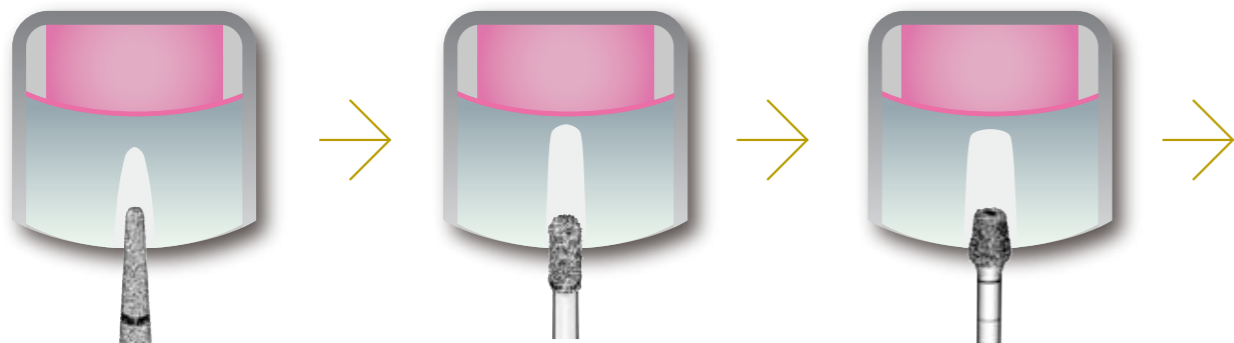

Um ponto inicial é adicionado para ativar a formação de osso.

Formação óssea para preparar o local de implante.

Expansão do local de implante e formação.

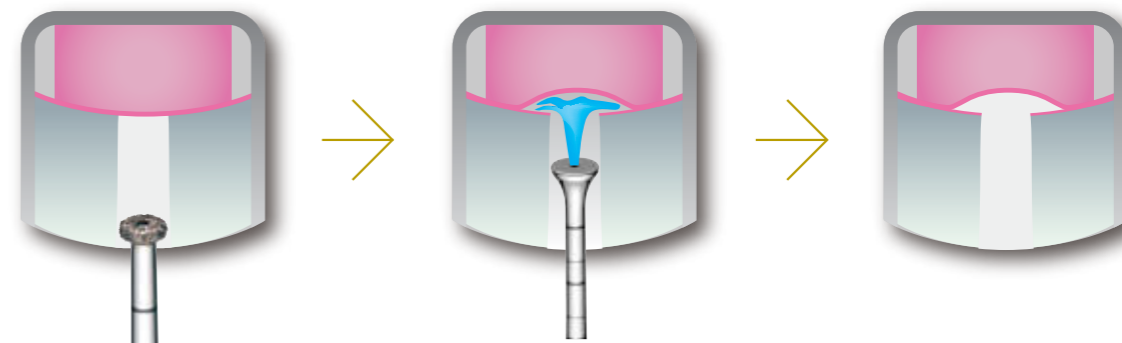

Perfuração do seio maxilar e formação de osso em na crista alveolar.


Elevação segura da membrana do seio maxilar com irrigação interna.

Formação do local de preparação depois da elevação da do seio.

PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

Para preparar locais para implantes, adicionar pontos iniciais e outros procedimentos.

MODELO **SG15A** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

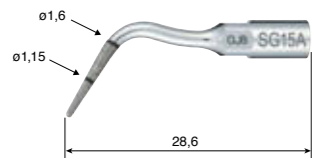


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305124

- Revestimento de diamante
- Diâmetro da extremidade da ponta; 0,7 mm
- Marcas a 5 mm e 10 mm da extremidade da ponta

MODELO **SG15B** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

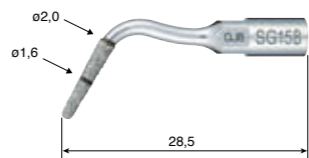

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305125

- Revestimento de diamante
- Diâmetro da extremidade da ponta; 1,3 mm
- Marcas a 5 mm e 10 mm da extremidade da ponta




Preparação para implante
SG15A, SG15B



Para preparar locais para implante, alisar superfícies ósseas e outros procedimentos.

PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

MODELO **SG15C** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%


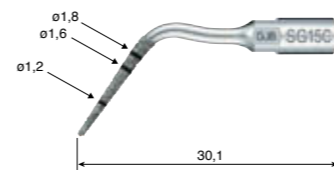


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305126

- Revestimento de diamante
- Diâmetro da extremidade da ponta; 0,9 mm
- Marcas a 5 mm, 10 mm e 12 mm da extremidade da ponta

MODELO **SG15D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

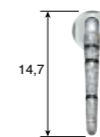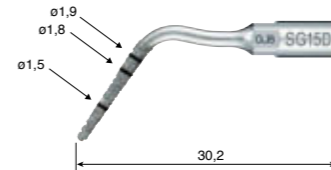

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305127

- Revestimento de diamante
- Diâmetro da extremidade da ponta; 1,3 mm
- Marcas a 5 mm, 10 mm e 12 mm da extremidade da ponta



Preparação para implante
SG15C, SG15D







PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

Para expandir e formar o local de preparação para implante na abordagem a partir da crista alveolar.

MODELO **SG16A** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

MODELO **SG16B** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

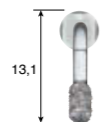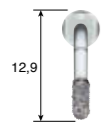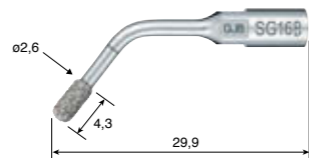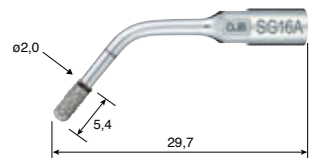

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305128

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305129

- Revestimento de diamante • Diâmetro; 2,0 mm
- Marcas a 5 mm e 10 mm da extremidade da ponta

- Revestimento de diamante • Diâmetro; 2,6 mm
- Marcas a 5 mm e 10 mm da extremidade da ponta



Preparação para implante
SG16A



Preparação para implante
SG16B



Para expandir e formar o local de preparação para implante na abordagem a partir da crista alveolar.



PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

MODELO **SCL2D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

MODELO **SCL4D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

IRRIGAÇÃO INTERNA

IRRIGAÇÃO INTERNA

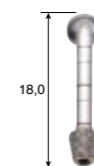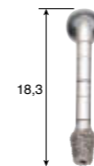

CÓDIGO DE ENCOMENDA


Z305182

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305184

- Revestimento de diamante

- Revestimento de diamante

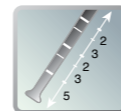

A profundidade do local de preparação para implante pode ser medida com as marcas na ponta.



Formação do local de preparação para implante
SCL2D, SCL4D



ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)

Para procedimentos como osteotomia do seio maxilar com abordagem da crista alveolar e ajustes do local de preparação para implante.

MODELO **SCL1D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

MODELO **SCL3D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

MODELO **SCL5D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%

IRRIGAÇÃO INTERNA

IRRIGAÇÃO INTERNA


IRRIGAÇÃO INTERNA



CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305171



CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305173

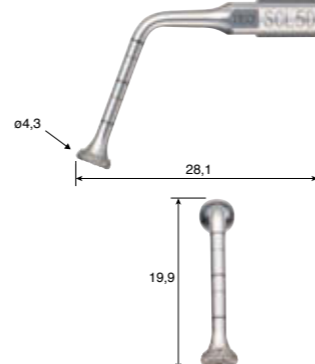


CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305175

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante

• Revestimento de diamante

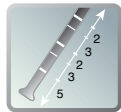

A profundidade do local de preparação para implante pode ser medida com as marcas na ponta.



Corte do leito da cavidade do local de preparação para implante

SCL1D, SCL3D, SCL5D



Elevação da membrana do seio com irrigação interna na abordagem a partir da crista alveolar.

ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)

MODELO **SCL1** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%


MODELO **SCL3** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

MODELO **SCL5** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%


IRRIGAÇÃO INTERNA

IRRIGAÇÃO INTERNA

IRRIGAÇÃO INTERNA

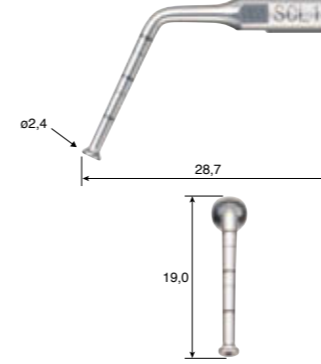

CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305170

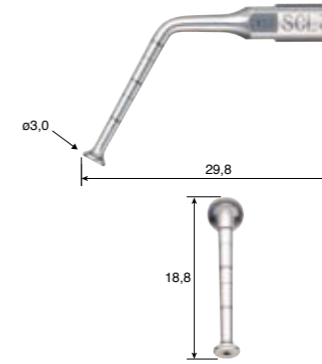

CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305172



CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305174



A profundidade do local de preparação para implante pode ser medida com as marcas na ponta.



Antes da elevação da membrana do seio maxilar

SCL1, SCL3, SCL5

ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)



ELEVAÇÃO DE SEIO


Para fenestragem óssea e formações ósseas.

MODELO **SG6D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 80%





CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305107

• Revestimento de diamante

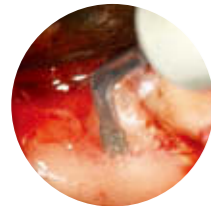

Avulsão de dentes do siso e dentes impactados
SG6D

MODELO **SG7D** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

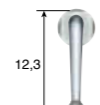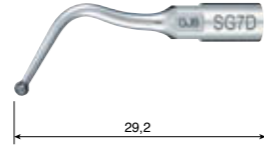

CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305108

• Revestimento de diamante





A janela óssea vestibular e osteoplastia precisa
SG7D

SEPARAÇÃO DA MEMBRANA DO SEIO

Para avulsão e elevação da membrana do seio maxilar.

MODELO **SG9** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

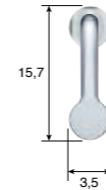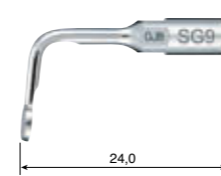


CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305110

• Elevador convexo circular liso • Ângulo de 90°



Separação da membrana do seio
SG9, SG10



MODELO **SG10** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

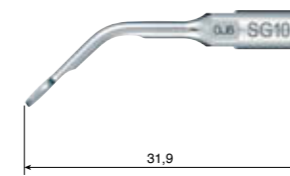

CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305111


• Elevador convexo circular liso • Ângulo de 135°

MODELO **SG11** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

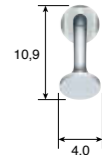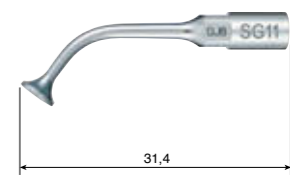


CÓDIGO DE ENCOMENDA
Z305112

• Compressor cônico

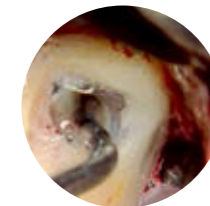


Elevação da membrana do seio
SG11

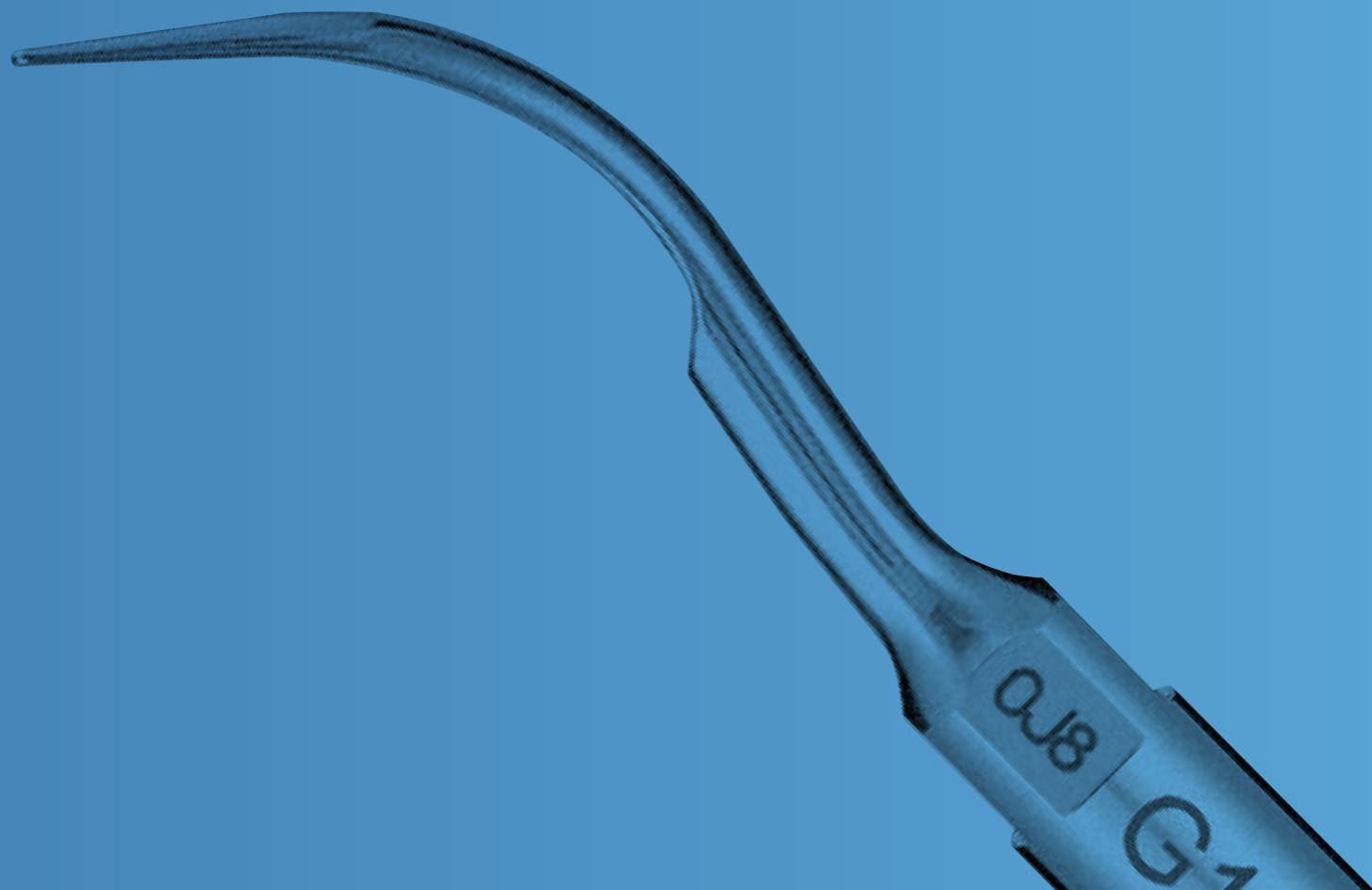

RASPAGEM

MODELO **G1-S** NÍVEL DE POTÊNCIA **SURG** 50%

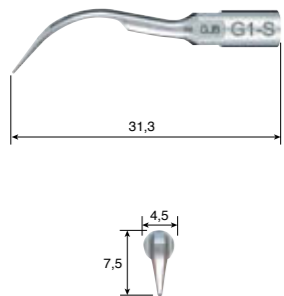


CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305113



Raiz única / várias
G1-S

MODELO **P20-S** NÍVEL DE POTÊNCIA **PERIO** 100%

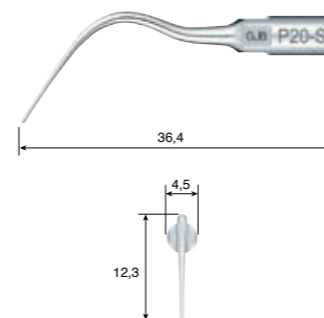

CÓDIGO DE ENCOMENDA


Z305114



Raiz única / várias
P20-S

MODELO **P25R-S** NÍVEL DE POTÊNCIA **PERIO** 100%

Remoção de Biofilme área de bifurcação.

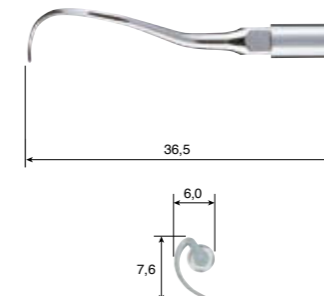

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305115


• Curva direita*



Raiz única / várias
P25R-S, P25L-S

MODELO **P25L-S** NÍVEL DE POTÊNCIA **PERIO** 100%

Remoção de Biofilme área de bifurcação.

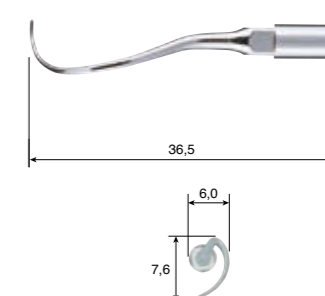

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305116

• Curva esquerda*

* A direção da curva da ponta é definida pela respetiva vista anterior.


MODELO **V10-S**

NÍVEL DE POTÊNCIA PERIO 100%

MODELO **V-P10**



Para a manutenção de próteses e implantes. Produzida com materiais especiais para permitir um desbridamento seguro sem danificar metais e implantes.

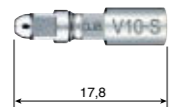

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305117

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y900184

- Inclui chave de substituição de Ponta E
- Ponta de plástico não incluída

- Conjunto de 3
- Suporte V10-S não incluído



V-P10

MODELO **V-P11R**

MODELO **V-P11L**

MODELO **V-P12**

Pontas de dupla flexão. Ponta extralonga para um acesso fácil a zonas complicadas e para evitar a interferência em dentes ou contornos próximos.

Uma versão mais longa da conhecida ponta V-P10.



CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002165

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002166

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002167

- Conjunto de 3 • Curva para a direita*
- Suporte V10-S não incluído

- Conjunto de 3 • Curva para a esquerda*
- Suporte V10-S não incluído

- Conjunto de 3
- Suporte V10-S não incluído




V-P11R, V-P11L



V-P12

■ As V-P11R/L, V-P12 apenas podem ser utilizadas com VarioSurg3 * A direção da curva da ponta é definida pela respetiva vista anterior.








ENDODONTIA

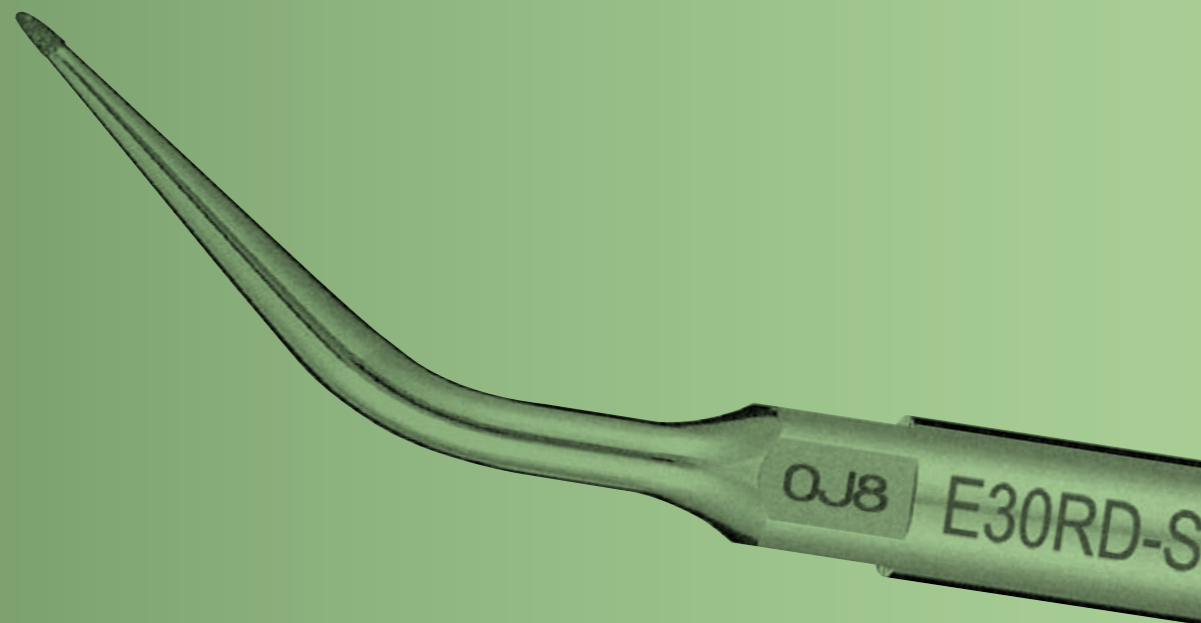

A ponta revestida de diamante microscópico possibilita uma remoção eficaz da dentina no ápice.

ENDODONTIA

MODELO **E30RD-S** NÍVEL DE POTÊNCIA ENDO 50% MODELO **E30LD-S** NÍVEL DE POTÊNCIA ENDO 50% MODELO **E31D-S** NÍVEL DE POTÊNCIA ENDO 50% MODELO **E32D-S** NÍVEL DE POTÊNCIA ENDO 50%

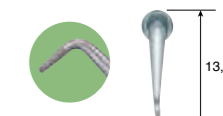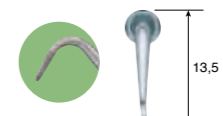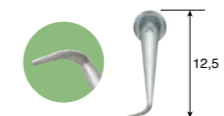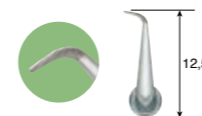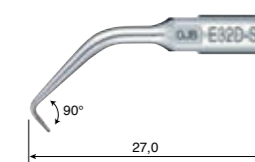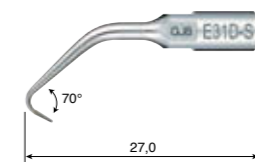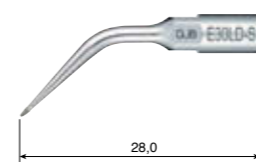

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305118

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305119

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Z305120

CÓDIGO DE ENCOMENDA


Z305121

- Revestimento de diamante
- Para dentes posteriores (ângulo direito*)


- Revestimento de diamante
- Para dentes posteriores (ângulo esquerdo*)

- Revestimento de diamante
- Para dentes anteriores e posteriores (70°)

- Revestimento de diamante
- Para dentes anteriores (90°)

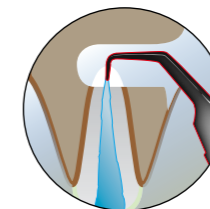

* A direção do ângulo da ponta é definida pela respetiva vista anterior.

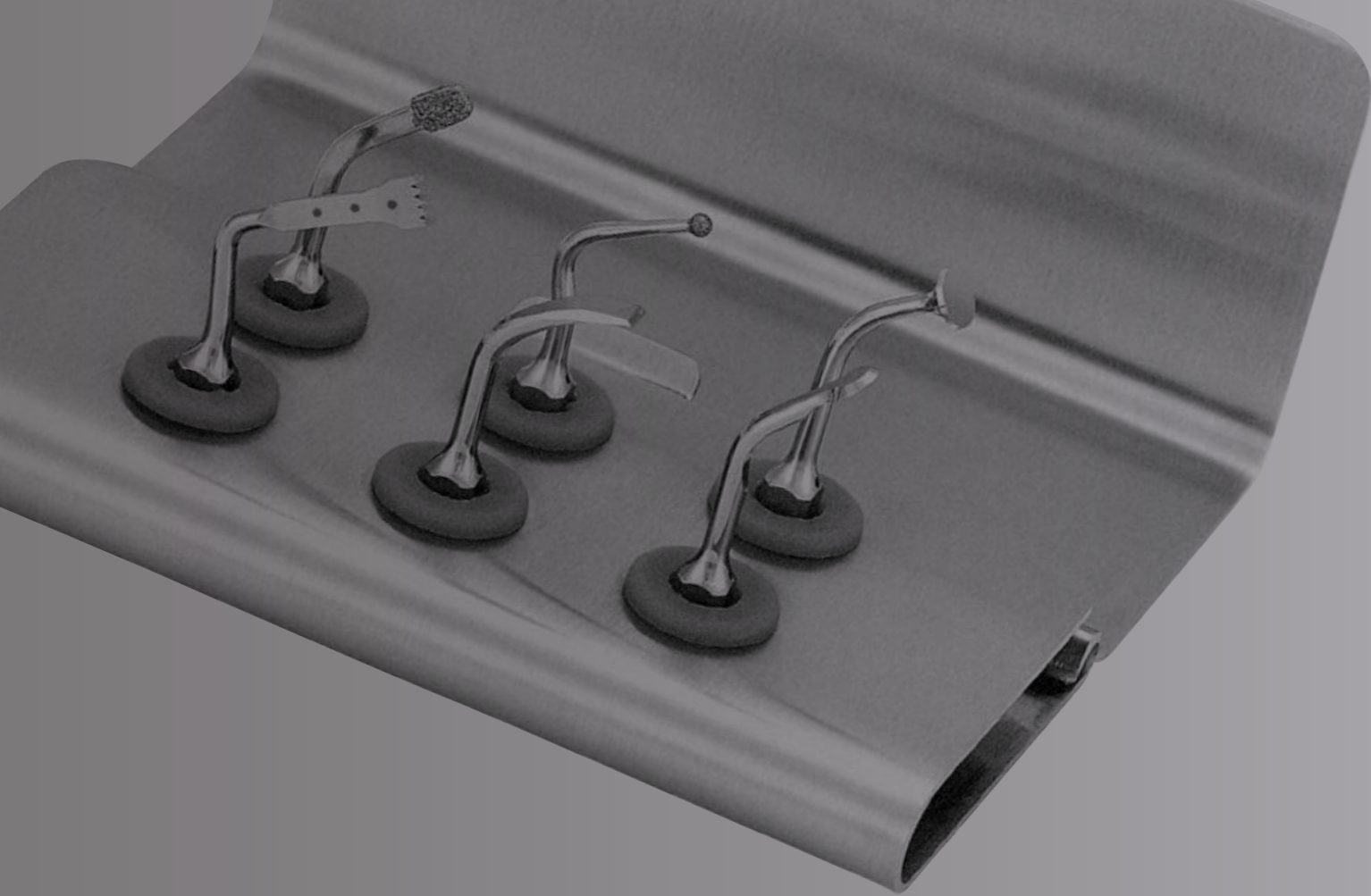

KIT DE PONTA

MODELO **Kit Básico H-S**

Conteúdo

- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Suporte de ponta



CIRURGIA ÓSSEA

RASPAGEM

ELEVAÇÃO DE SEIO

SEPARAÇÃO DA MEMBRANA DO SEIO

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002775

MODELO **Kit de Corte de Osso**

Conteúdo

- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Suporte de ponta



CIRURGIA ÓSSEA

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y900688

MODELO **Kit de Preparação para Implante**

Conteúdo

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Suporte de ponta



PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y900774

MODELO **Elevação de Alvéolo (ABORDAGEM CRESTAL)** Kit para Implante de Tamanho Normal

Conteúdo

- SCL1D, SCL2D, SCL1
- Chave de ponta VS • Suporte de ponta • Manual



ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002841

MODELO **Kit de Elevação do Seio**

Conteúdo

- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Suporte de ponta



ELEVAÇÃO DE SEIO

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y900689

MODELO **Kit Endo-S**

Conteúdo

- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Suporte de ponta



ENDODONCIA

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y900691

MODELO **Elevação de Alvéolo (ABORDAGEM CRESTAL)** Kit para Implante de Grande Dimensão

Conteúdo

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
- Chave de ponta VS • Suporte de ponta • Manual



ELEVAÇÃO DE ALVÉOLO (ABORDAGEM CRESTAL)

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Y1002842

VarioSurg3

Vantagens

- Peça de mão superfina com LED
- Ampla gama de pontas para uma ampla gama de aplicações
- Sistema Link 2 com Surgic Pro (motor de implante)



CONJUNTO COMPLETO

COM LUZ MODELO : **VarioSurg3 (230V)** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1002726**

Conteúdo:

- Unidade de controlo ● Peça de mão LED com cabo de 2 m ● Pedal de controlo FC-78
- Estojo de esterilização ● Suporte da peça de mão ● Tubo de irrigação (5 pçs.) e outros acessórios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte da ponta)

CONJUNTO COMPLETO SEM PEDAL DE CONTROLO

COM LUZ MODELO : **VarioSurg3 (230V) Non FT** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1002248**

Conteúdo:

- Unidade de controlo ● Peça de mão LED com cabo de 2 m
- Estojo de esterilização ● Suporte da peça de mão ● Tubo de irrigação (5 pçs.) e outros acessórios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte da ponta)

Especificações :

Unidade de Controlo	
• Frequência	: 28-32 kHz
• Alimentação Elétrica	: 230 V 50/60 Hz
• Caudal de Irrigação	: 10~75 mL/min
• Programas	: SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2
• Dimensões	: L 265 x P 220 x A 100 mm



NAKANISHI INC. www.nsk-inc.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis, 28232 Las Rozas, Madrid, Spain

As especificações técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.